

Waschanleitung Klinik-Textilien

(Kasacks, Hosen, Mäntel, Abdecktücher)

Baumwolle und Mischgewebe

Pflege: waschbar bis 95 °C , trocknergeeignet
autoklavierbar: niedrigste Stufe

Sie können die Lebensdauer Ihrer Kleidung mit der richtigen Pflege erheblich verlängern.

Wenn die Kleidungsstücke richtig gereinigt oder gewaschen werden, halten sie deutlich länger.

Bunte Kleidung mit der Waschanleitung 95° C kann anfangs abfärben.

Waschen sie dunkle Kleidungsstücke stets separat und wählen Sie ein Waschmittel ohne Bleichmittel. Drehen Sie am Besten dunkle Kleidung stets auf links, bevor Sie sie in die Waschmaschine legen. Das verringert den Verschleiß der sichtbaren Außenteile.

Alle Baumwollteile sollten nach der Wäsche gestreckt und zum Trocknen aufgehängt werden.

Bei der Wäsche sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass eine Überladung der Maschine vermieden wird. Darüber hinaus ist eine korrekte Waschmitteldosierung von Wichtigkeit.

Bitte beachten Sie, dass Desinfektionsmittel mit optischem Aufheller und Bleichmittel die Farbbrillanz der Textilien beeinträchtigen können.

Farbabweichungen bei OP-Geweben, insbesondere Baumwolle, sind nicht ganz vermeidbar.

Warum sind nur 3 Seiten bei Abdeck-Loch oder Schlitztüchern gesäumt ?

Die Seiten, die nicht gesäumt wurden, haben eine feste Kante (Webkante), früher auch als Selfkante bezeichnet.

Diese Webkante muss nicht gesäumt werden, weil sie sich nicht lösen kann und somit auch nicht ausfranst. Auf Grund der Größe der Tücher oder auch der Breite des Stoffes sind somit immer etliche Tücher nur an 3 Seiten gesäumt.

Unsere Preise basieren auf einer Mischkalkulation, die dies berücksichtigt. Würde Sie darauf bestehen, dass immer alle Seiten gesäumt sind, müssten Sie einen höheren Preis zahlen, zumal die feste Kante schwieriger zu säumen ist, da sie unflexibler ist.