



# Bowie & Dick Test

Gemäß  
RKJ/KRINKO 2012  
Anlage 4  
Unsere Empfehlung: Test 1 x tgl.  
bei Einschaltung des Gerätes durchführen.

Entspricht  
**DIN EN ISO**  
11140-1 Typ 2  
& 11140-4

**Täglicher Funktionstest zur gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsprüfung von Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum**

## Produktdetails

Bei Sterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum (Klasse B bzw. Großsterilisatoren) muss als Bestandteil der Routinekontrolle täglich ein Bowie & Dick Test durchgeführt werden. Damit wird überprüft, ob der Dampf das Sterilgut gleichmäßig durchdringt.




## Anwendung

1. Den Test in die leere Sterilisatorkammer legen.
2. Programm für den Bowie & Dick Test starten (134 °C / 3,5 min).
3. Nach Beendigung des Zyklus den Test aus der Sterilisatorkammer nehmen.
4. Den Indikatorbogen am Überstand fassen und herausziehen, um ihn auf Farbumschlag zu prüfen.

## Auswertung

Prüfen Sie den Indikatorbogen auf Farbumschlag – hierzu ist keine Farbkarte erforderlich. Durch den Sterilisationsprozess bildet sich auf dem Überstand eine Referenz, die mit dem Indikatorfeld durch ein einfaches Umklappen verglichen werden kann. Bei einer ausreichenden Sterilisation sollte das Indikatorfeld ebenso wie die Referenz gleichmäßig pink verfärbt sein. Das Ergebnis zur Dokumentation in das Sterilisationstagebuch (Best.-Nr. 810001) eintragen.

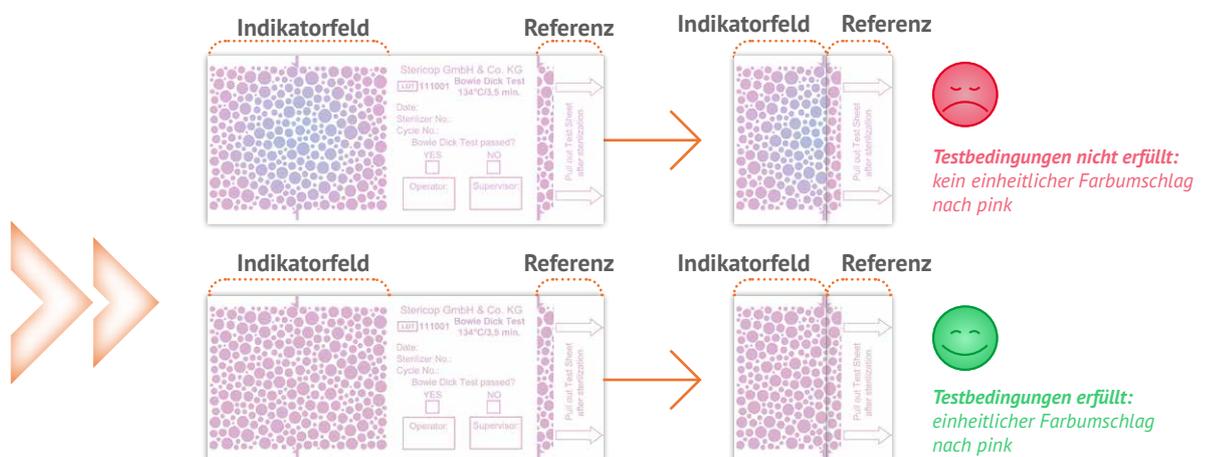

Stericop GmbH & Co. KG  
Biedrichstraße 10  
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0  
F +49 (0) 6036 984 33 21  
info@stericop.de  
www.stericop.de

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
Bowie & Dick Test	521015	15 Stück	trocken bei Raumtemperatur	3 Jahre ab Herstellungsdatum